

Placere sejl uden vending



Læg sejlet med benstropperne mod hovedet og bagsiden mod patientens krop.



Glid den **ene benstrop** imellem de 2 lag spilerdug ind under hovedpuden og lige over mod kollega.



Kollega finder benstroppen og trækker langsom i stroppen. Trækket skal være lige og ikke ned mod patientens skulder

Brehms Spilerdug ApS

Tlf.:+45 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk



I fortsætter med at glide og trække **roligt**.

Den der glider sejlet ind holder igen på øverste lag spilerdug så personen ikke glider med.

OBS. Der er ikke behov for at I løfter i hovedpuden!



Når sejlet er kommet rundt tjekker I at sejlet ligger midt under patienten inden I trækker det ned bag patientens ryg.



Sikre jer, at benstropperne ligger imellem de 2 lag spilerdug før i trækker sejlet ned bag patientens ryg.



Træk roligt i begge benstroppe samtidig.

Træk langs med madrassen, ikke opad mod patientens ryg.

Hæv evt. sengen.




Tjek og korriger sejlet hvis det ligger skævt.



I kan trække og skubbe sejlet mellem de 2 lag spilerdug.

Den der skubber, holder igen på den øverste lag spilerdug.

Den der trækker kan rulle sejlet så grebet bliver større

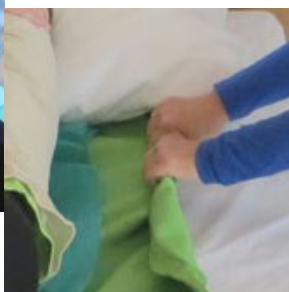



Glid benstropperne imellem de 2 lag spilerdug og ind under patientens lår, og kryds dem



Fjern det øverste lag spilerdug ved at folde det nedad mod sejlet nede ved lårene.

Fold op til patientens skulder!

Er sejlet svært at fjerne og **I vurderer at patienten er stabil**, kan I nu lifte patienten med spilerdug, det gør sejlet lettere at fjerne.



Vil I fjerne spilerdugen helt trækker I bare i den fold I har lavet når den er ved patientens skulder.

CE



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

Placere sejl uden vending (001)