

Placere og fjerne spilerdug under Spiler+



Fæst **Spiler+ Short** eller **Long** på liftens løfteåg.

Fold spilerdugen i fede folder.



Kør liften lidt op så du skaber plads. Personen skal blot vippes lidt.

Placer spilerdug halvt ind under kroppen, som du plejer.

Her er anvendt et foldet stykke under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg på modsatte side og køр liften lidt op så personen vippes.

Fold spilerdugen ud.

Nu kan du anvende liftens til at trække personen til siden, vendinger eller højere op i seng.



Hvis du anvender **Spiler+ Long**

Her er anvendt et foldet stykke under kroppen og et under lægge/fødder.

Yderligere information om at placere spilerdug, se At Placere spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.


Fjern spilerdugen



Når forflytningerne er udført, fjernes spilerdugen.

Fæst Spiler+ på liftens løfteåg og kør liften lidt op så personen vippes.

Glid spilerdugen halvt ind under kroppen.

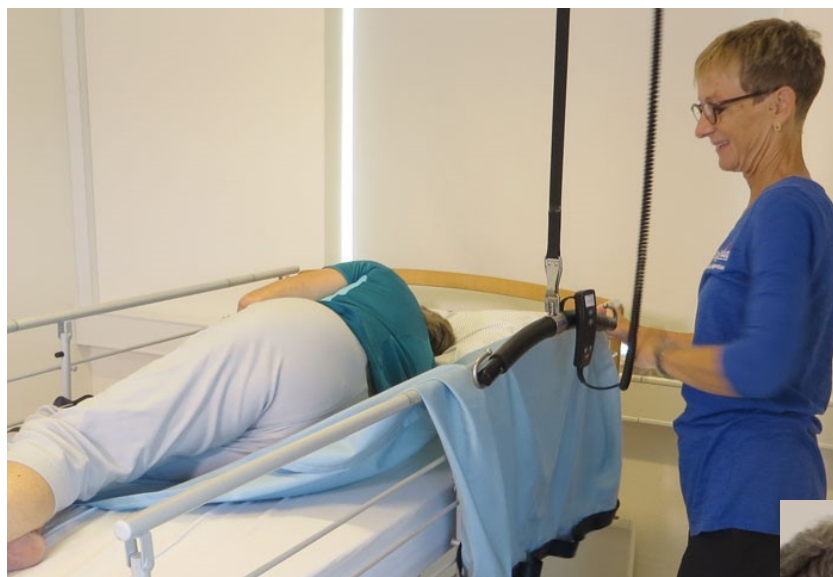

Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fjern spilerdugen fra modsatte side.

Yderligere information om at fjerne spilerdug, se At fjerne spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.

Information og vejledende anbefalinger



Spiler+ Short

Varenummer/HMI: 101928

145 cm bred cm. X 140 cm lang.

Vejledende størrelse på spilerdug:

175 cm bred x100 cm lang, foldet *eller* 2 stykker 100 cm bred x130 cm lang



Spiler+ Long

Varenummer/HMI: 101927

145 cm. bred X 240 cm lang.

- *kan eventuelt erstatte lagnet* -

Vejledende størrelse på spilerdug:

175-200 cm bred x100 cm lang foldet *eller* 2 stykker 100 cm bred x 100 cm lang under kroppen *og*

100 cm x 100 cm foldet *eller* 2 stykker 65-100 cm x100 cm under lægge og hæle.

Eller 2 stykker 100x200 cm. oven på hinanden.

Fakta

Kan vaskes på 80 grader og tørre tumbles ved lav temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester og 20 % bomuld (lagen), 100% polyester (greb)

Anvendes med spilerdug under.



Spiler+ er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

