

## Røntgenplade under thorax

At føre røntgenplade under thorax er specielt svært, når personalet fra røntgen afdelingen skal arbejde ved en plejeseng.

Sengen kan have en eftergivelig madrass, hvorved arbejdsbelastningen øges.



Røntgenpladen lægges ind i en polstret glat pose.

Alternativt kan man slå et stykke spilerdug omkring røntgenpladen.



2 lag spilerdug føres under personen.

Røntgenpladen kan nu frit skubbes ind imellem de 2 lag. Vær opmærksom på vinklen mellem plade og madrass samt evt. mulighed for at aktivere patienten.

Pladen er nu let at justere.

# Metodevalg

Valget af metode vil afhænge af om arbejdet udføres af :


1 hjælper eller 2 hjælpere

**Når arbejdet udføres af 1 hjælper:**

## **METODE 1**

1 stykke spilerdug 100 x 200 cm (evt. lidt mindre).

Stykket foldes og føres under en person med foldsiden ved den ene sengekant .

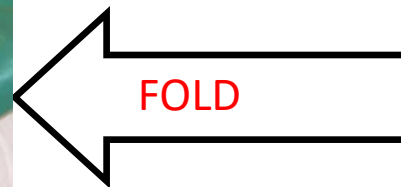

Når stykket fjernes foldes de 2 stykker spilerdug imod hinanden og man trækker det ud ved et diagonalt træk .

Trækretning.

## METODE 2



2 stk. spilerdug á 1m x 1m.  
lægges ovenpå hinanden og føres under  
den sengeliggende person. Stykkerne  
skal dække området fra hovedgærde til  
under thorax.



Når stykkerne skal fjernes folder man 2  
snipper imod hinanden ved den ene side  
(det øverste lag spilerdug foldes ned-  
efter og det nederste lag spilerdug foldes  
opefter).



Fra modsatte side tages fat i snipperne  
og spilerdugen fjernes ved et diagonalt  
træk. (se sorte pil)

Teknikker med at føre spilerdug under en person. Se [www.spilerdug.dk/vejledninger](http://www.spilerdug.dk/vejledninger) "At placere spilerdug"



## Når arbejdet udføres af 2 personer:

### METODE 1

1 stykke spilerdug 100 x 150cm

Stykket foldes og føres under en person med **folden ved personens lænd.**



Når stykkerne skal fjernes.

De 2 hjælpere griber i folden ved hver sin side.

De fører folden ind imellem de 2 lag spilerdug.

Nu trækkes (glides) spilerdugen væk uden at genere tøj/hud på den sengeliggende person.

### METODE 2

Samme som beskrevet på side 3, blot kan hjælperne fra hver sin side af sengen hjælpe hinanden.

Til placering af røntgenplade under thorax kan spilerdug standard (den blå ) og spilerdug mellem (den grønne ) benyttes. Den blå har sin fordel i at være meget stiv. Den grønne har den fordel at den ikke rasler så meget.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

