

Forflytning til sengekant med Spiler+



Spiler+ er forflytningslagnet, som du anvender sammen med spilerdug, når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet.

Personen ligger fast på Spiler+ og spilerdug placeres under Spiler+.

I denne vejledning får du eksempler på, hvordan du kan benytte Spiler+ til at flytte en person ud til sengekanten, med og uden vending, f.eks. i forbindelse med plejeopgaver.

Forflytning til sengekant mod hjælper, passiv person



Vi har i dette eksempel benyttet en Spiler+ long, men du kan bruge samme teknik med en Spiler+ short.

Dobbelt lag spilerdug er placeret under Spiler+ i hele personens længde.



Hægt Spiler+ på liftens åg ud for skulder og hofte.

Ved plejeopgave fra begge sider af sengen, kan du gøre som følger, for at undgå at flytte åget flere gange.



Start med at glide benene væk fra lift-siden af sengen.



Gå om på den anden side.

Hæv liften, så personen bliver vippet og tyngden "samles".

Træk vandret i roligt tempo ud for skulder og hofte.



Træk indtil personen er tæt på sengekanten.

Juster evt. stillingen ved at trække ud for læggene.

Nu kan du sænke liften men lade den forblive på åget, og udføre din opgave med kort rækkeafstand.

Til sengekant væk fra hjælper



Når personen skal til modsatte side:

Start med at glide benene længere ind i sengen.



Hæv liften, så personen bliver vip-
pet.

Glid personen mod modsatte side af
sengen ved hofte og skulder.



Hvis du holder fjernbetjeningen i
hånden, kan du evt. placere den un-
der puden tæt ved skulderen, for ik-
ke at ramme personens krop direk-
te.



Når personen er kommet til mod-
satte side:

Sænk liften og fjern åget.

Så er du igen klar til at arbejde med
personen tæt på dig.

Til sengekant og vending, passiv person



Dobbeltlag spilerdug er placeret under Spiler+ i hele personens længde.

Forbered personen til en vending.




Hægt liften på stropperne ud for skulder og hofte.



Gå om på modsatte side.

Hæv liften, så personen kommer næsten om på siden.

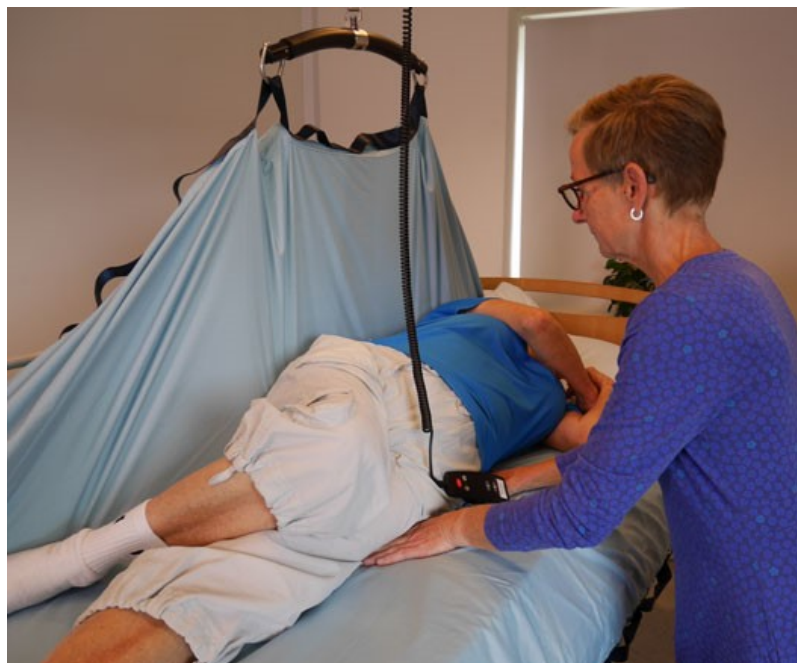

Glid personen over mod modsatte
sengekant i etaper ved hofte -



og ved skulder.



Hæv liften til personen ligger
stabilt på siden.

Variation



Hæv liften til Spiler+ strammes til.
Glid personen til modsatte sengekant mens liftemn fortsat køres op indtil personen er i sideliggende.



Sørg for at personen ligger stabilt, inden du sænker liften igen.



Fjern stropperne fra den åget.
Nu er du klar til at udføre din plejeopgave - f.eks. nedre hygiejne.



Som supplement til denne kan du på vores hjemmeside se flere vejledninger og videoer om anvendelsen af Spiler+.

Spiler+ findes i 2 udgaver:

Spiler+ long, 240 cm x 145 cm, varenr/HMI: 101927

Spiler+ short, 140 cm x 145 cm, varenr/HMI: 101928



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"Forflytning til sengekant med Spiler+" (rev 002)

