

Placere og fjerne spilerdug under Spiler+



Fæst **Spiler+ Short** eller **Long** på liftens løfteåg.

Fold spilerdugen i fede folder.



Kør liften lidt op så du skaber plads. Personen skal blot vippe lidt.

Placer spilerdug halvt ind under kroppen, som du plejer.

Her er anvendt et foldet stykke under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg på modsatte side og køр liften lidt op så personen vippes.

Fold spilerdugen ud.

Nu kan du anvende liftens til at trække personen til siden, vendinger eller højere op i seng.



Hvis du anvender **Spiler+ Long**

Her er anvendt et foldet stykke under kroppen og et under lægge/fødder.

Yderligere information om at placere spilerdug, se At Placere spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.

Fjern spilerdugen



Når forflytningerne er udført, fjernes spilerdugen.

Fæst Spiler+ på liftens løfteåg og kør liften lidt op så personen vippes.

Glid spilerdugen halvt ind under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fjern spilerdugen fra modsatte side.

Yderligere information om at fjerne spilerdug, se At fjerne spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.

Information og vejledende anbefalinger



Spiler+ short

Varenummer/HMI: 101928

145 cm bred cm. X 140 cm lang.



Spiler+ Long

Varenummer/HMI: 101927

145 cm. bred X 240 cm lang.

- kan eventuelt erstatte lagnet -

Fakta

Kan vaskes på 80 grader og tørre tumbles ved lav temperatur.

Maxbelastning 200 kg.

80 % polyester og 20 % bomuld (lagen), 100% polyester (greb)

Anvendes med spilerdug under.



Spiler+ er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"Placere og fjerne spilerdug under Spiler+" (rev. 002)

