

Sejl på i seng med Spiler+



Spiler+ er forflytningslaget, som du anvender sammen med spilerdug, når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet.

Personen ligger fast på Spiler+ og spilerdug placeres under Spiler+.

I denne vejledning får du eksempler på, hvordan du kan benytte Spiler+ til at lægge sejl på en person i sengen.

Sejl på fra siden med Spiler+, passiv person



Vi har i dette eksempel benyttet en Spiler+ short, men du kan bruge samme teknik med en Spiler+ long.

2 stykker spilerdug placeres under Spiler+



Vend personen om på siden med Spiler+, og lad åget sidde på.

Se evt. vejledningen "Vending i seng med Spiler+"



Fold benstroppen mod indersiden af sejlet og fold derefter mod ydersiden og midtlinien af sejlet.



Hæft sejlet mellem de to lag spilerdug og glid det derefter ind, så det ligger symmetrisk, når personen kommer tilbage på ryggen.



Tjek at sejlet ligger som det skal, både på langs og på tværs.



Glid stropperne ind under hovedpuden, så du kan fange dem fra modsatte side.



Sænk liften og lad personen følge med om på ryggen.



Fang benstroppen under puden og træk den i madrasniveau diagonalt ud og ned mod fodenden.



Træk derefter skulderstroppen i madrasniveau diagonalt ud og op mod hovedenden.



Du kan nu vælge at benytte spilerdugen til at glide benstroppen ind under låret.

Fjernelse af Spiler+



Fold Spiler+ nedad omkring det øverste lag spilerdug og glid den ind ovenpå sejlet.



Glid Spiler+ så langt ind, at du kun kan skimte den.

Vær specielt opmærksom på, at den kommer godt ind ved skulder og hofte.



Glid nu den anden benstrop ind under låret, eller vent evt. til personen er vipet.



Hæv liften, så personen vipkes.
Find hjørnet af Spiler+ mellem de to lag spilerdug.



Træk nu i roligt tempo og diagonalt Spiler+ ud og op mod hovedenden, indtil den er fjernet helt.

Personen vil gradvist følge med bevægelsen tilbage til rygliggende.

Sejl på fra gavlenden med Spiler+, passiv person



2 stykker spilerdug er placeret under Spiler+.

Hovedpuden er placeret helt ned under skuldrene, da det øger komforten for personen under løftet.



Hægt 2-3 stropper på liftens åg i begge sider. Start ud for skulderen, og fortsæt op mod hovedgavlen.

Dette giver en øget hovedstøtte for personen under løftet.



Hæv liften, så personens overkrop kommer fri af underlaget.

Det er dog vigtigt at lave en individuel vurdering af, hvor højt personen bør løftes.





Hold sejlet, så du kan glide det ind under personen med indersiden opad.



Glid sejlets ene benstrop ind imellem de to lag spilerdug ca. ud for skuldrene.



Glid det så langt ind at det ligger symmetrisk i forhold til personen.



Glid sejlet så langt ned som muligt — dog ikke længere end til halebenet.



Justér om nødvendigt sejlets placering fra fodenden af sengen, og tjek om det ligger korrekt både på langs og på tværs.



Sænk liften og fjern stropperne fra den ene side af åget.

Fjernelse af Spiler+



Fold Spiler+ nedad omkring det øverste lag spilerdug og glid den ind ovenpå sejlet.



Glid Spiler+ så langt ind, at du kun kan skimte den.



Vær specielt opmærksom på, at den kommer godt ind ved skulder og hofte.



Fjern stropper fra åget, så der kun er én strop tilbage ud for skulderen.

Placér en strop i åget ud for hoften.



Hæv liften, så personen vipkes.



Find hjørnet af Spiler+ mellem de to lag spilerdug.



Træk nu i roligt tempo og diagonalt Spiler+ ud og op mod hovedenden, indtil den er fjernet helt.

Personen vil gradvist følge med bevægelsen tilbage til rygliggende.



Ved hjælp af disse to eksempler kan du på en let og skånsom måde give en passiv eller tung person sejl på med hjælp fra Spiler+ og loftlift.

Som supplement til denne kan du på vores hjemmeside se flere vejledninger og videoer om anvendelsen af Spiler+ .

Spiler+ findes i 2 udgaver:

Spiler+ long, 145 cm bred x 240 cm lang, varenr/HMI: 101927

Spiler+ short, 140 cm x 145 cm, varenr/HMI: 101928



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"sejl på i seng med Spiler+" (rev 002)

