

Bugleje. Til og fra op-leje

Aleris Hamlet, Søborg

Vejledningen viser eksempler på, hvordan man på operationsafsnittet anvender Spilerdug. Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflytningsmetoder.



Spilerdug anvendes her for at kunne positionere pt korrekt efter forflytning til op-leje, og igen når han/hun kommer retur i sengen.

Placér 2 stykker foldet Spilerdug med folderne mod hinanden, der hvor pt's krop kommer til at ligge.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk

Til bugleje



Et foldet lagen placeres på tværs med ekstra længde ud til operatørens side.



Lagnet på sengen løsnes hele vejen rundt, da det skal bruges til forflytningen.

Kør sengen til - lidt højere end op-lejet.

Pt rykker sig ud på sengekanten nærmest op-lejet.



Pt bedøves.

Pt's arm nærmest op-lejet placeres ned langs siden og modsatte ben bøjes.


Lagnet slås op om pt og er dermed også med til at stabilisere det bøjede ben.

Når alle er klar rulles pt om i bugleje.



Sengen fjernes og armstøtte monteres.

Nu kan pt's stilling justeres både sidevers

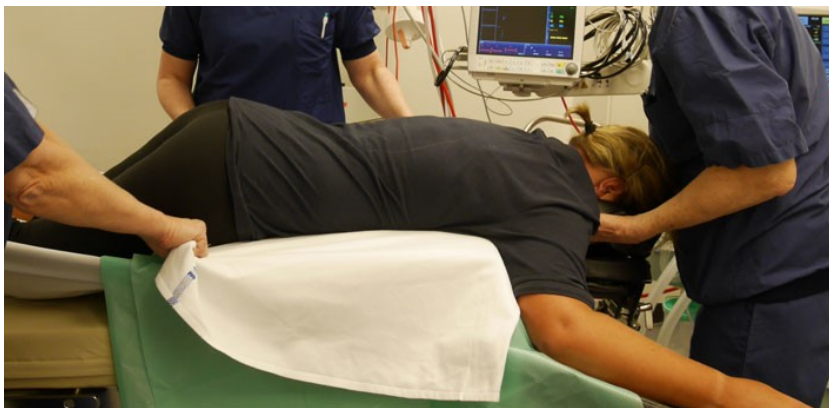

- og op og ned ved at trække i tværlagnet.



Fjern de 2 stykker Spilerdug, ét ad gangen ved at trække i nederste lag, diagonalt på kanterne. Skift til modsatte kant, hvis det føles tungt.

Fra bugleje



Afmonter armlæn.

Placér pt's arme langs siden.

Placér 2 stykker foldet Spilerdug på sengen i hele pt's længde. Folden skal være længst væk fr pt.

Kør sengen til - lidt lavere end op-lejet.

Vip op-lejet en smule mod sengen.



Tværlagnet slås op over pt, så hjælper ved sengen kan gribe fat i det.

Når alle er klar rulles pt om på ryggen over i sengen.



Kør sengen væk fra op-lejet.

Ret pt så han/hun kommer til at ligge midt i sengen.

Fjern de 2 stykker Spilerdug, ét ad gangen ved at glide spilerdugen halvt ind under pt'en og herefter trække i nederste lag, diagonalt på kanterne. Skift til modsatte kant, hvis det føles tungt.

Spilerdugsstørrelse: Op-leje 2 stk. 100x100cm, Seng 2 stk. 100x150cm.-kan også bruges på lejet.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave
"Bugleje. Til og fra op-leje", Aleris Hamlet, Søborg (rev 01).

