


Knæalloplastik—forflytning på leje og til seng

Aleris Hamlet, Søborg

Vejledningen viser eksempler på, hvordan man på operationsafsnittet anvender Spilerdug. Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflytningsmetoder.

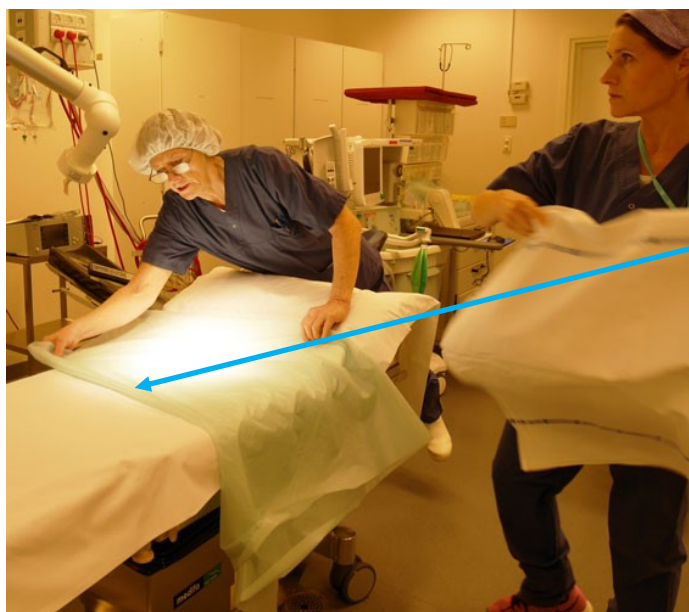

Fold Spilerdug på den kort side 2 gange
Placer Spilerdugen på op-leje så folden ligger "midt" på op-leje og enderne ligger op over pude, ca 10 cm.

Lad Spilerdugen flugte op-lejet til operatør siden, så der er overskud i modsatte side til når I skal forflytte pt fra op-leje til seng.



Placer tværlagen så det dækker fra og med bagdel op forbi skuldre på pt.

Lad mest muligt af tværlagnet hænge ud over op-lejet væk fra operatøren, så I kan trække i det når I forflytter pt tilbage i seng.



Lad pt sætte sig på tværlagnet/op-lejet udenfor Spilerdugen.



Fold Spilerdugen ud under bagdelen ved at pt vipper sig selv fra side til side



Lad pt vende sig på siden for anlæggelse af rygmarvsbedøvelse.



Placer et foldet Spilerdug under nederst bens læg og hæl for at lette vending retur til ryg samt positionering på op-leje.



Vend pt retur til ryg og positioner pt på op-leje.



Fjern Spilerdugen under lægge og hæle for at stabilisere personen under op.

Fold evt. Spilerdugen tilbage op under bagdelen hvis mere stabilisering behøves.

Forflytning fra OP-leje til seng



Lad pt vågne så meget at denne kan være aktiv med i forflytningen.

Placer igen foldet Spilerdug under lægge og hæle med overskud af spilerdug ud mod seng



Kør sengen til og læg Spilerdugene og tværlagen over på sengen.
Sænk sengen under niveau med op-leje og skråtstil op-leje lidt.



Glid pt over i seng ved at skubbe på kroppen og trække i tværlagen.
Hold jeres ryg så oprejst som muligt



Glid pt's ben ind i seng og positioner pt inden I fjerner Spilerdug.
Fjern Spilerdugen ved at glide den halvt ind under pt og træk skiftevis i kanterne på det nederste lag af Spilerdugene i niveau med madras.

Spilerdugsstørrelser 100 x min 175cm under krop

100x 150cm under lægge og hæle



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"Knæalloplastik—forflytning på leje og til seng Aleris Hamlet, Søborg" (rev 01)

