

## Placering i komfortkørestol



I denne vejledning finder du eksempler på hvordan du anvender Spilerdug i forbindelse med at placere en person i en komfortkørestol. Du kan ligeledes finde videoen om emnet på vores hjemmeside.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - [info@spilerdug.dk](mailto:info@spilerdug.dk) - [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk)

## Placering i komfortkørestol med loftlift



Kip stolen, så hældningen på stoleryggen er den samme som personens ryg, når han/hun sidder i sejlet.



Placér 2 stykker foldet Spilerdug i kørestolen. Folderne skal vende ind mod midten og Spilerdugen skal placeres en håndsbredde (ca. 10 cm) fra forkanten og ca. 15 cm op ad stoleryggen.



Lift personen ned til lige over sædet. Først her føres personen tilbage mod stoleryggen og placeres.

Afhængigt af hvor megen styring der skal til for korrekt placering, kan du enten:

Holde om sejkanten helt nede ved personens lår.



eller:

holde på personens knæ



eller:

Tage fat inde omkring personens hofter.

Med dette greb kan du lave den mest præcise placering.

## Fjernelse af benstropper



Start med at vippe benstroppen nedad og glid det hjørne der er tættest på stoleryggen ind under låret.

Før derefter stropperne ud under knæhasen.



**OBS:** Det er vigtigt hele tiden at have styr på hvor stropperne er, så du er sikker på at få fat i den rigtige.

Træk diagonalt bagud i den strop der er tættest på stoleryggen.



Træk benstroppen helt tilbage til stoleryggen.



Fjern Spilerdugen ved at trække i nederste lag, diagonalt bagud.

## Fjernelse af sejlet manuelt



Kip stole frem til oprejst.

Bed personen læne sig frem.

For at skabe tryghed, kan du placere en pude eller lign. i skødet på personen.

Træk stropperne helt tilbage til stoleryggen.



Træk sejlet fri med begge hænder.



Alternativt:

Placér personen tæt foran sengehe-  
sten, sengegavlen eller lign.

Bed personen holde fast med begge  
hænder.



Træk stole tilbage mens personen bi-  
holder grebet.

Herved skabes luft mellem ryg og  
stoleryg.

Variationerne kan bruges både ved  
fjernelse og placering af sejlet.

## Fjernelse af sejlet med loftlift



Når personen ikke kan læne sig frem.

Tag et stykke foldet Spilerdug og lav 3-  
4 harmonikafolder fra den ende med  
den oprindelige fold.

Anvend et stykke der er bredere end  
kørestolen. Det gør det lettere at pla-  
cere og fjerne.



Fæst Spilerdugen mellem sejlet og persons ryg - med harmonikafolderne væk fra personen.

Bed personen dreje sig væk fra dig, så der skabes luft til at placere Spilerdugen.

Placér din hånd i den yderste harmonikafold og glid Spilerdugen ned.

Gør det samme i den anden side.

Hægt benstroppe på løfteåget igen, så slipper du for at stropperne hænger fast andre steder.



Hæv liften, så sejlet fjernes uden at trække i tøj eller hud.

Fjern Spilerdugen ved at gribe om folden i den ene side og træk Spilerdugen diagonalt mellem de to lag.



Du kan finde yderligere inspiration på vores hjemmeside, f.eks. i videoerne og vejledningerne: "Længere tilbage i stol" og "Sejl på og af i kørestol".



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"Placering i komfortstol" (rev 001)

