

## Fra seng til scanningsleje og retur.

Vejledningen viser eksempler på, hvordan man på Klinisk Fysiologisk Nuklear-medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge, anvender Spilerdug.

Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflytningsmetoder.

## Fra liggende i seng til liggende på scanningsleje.



Fold Spilerdugen 1/3.

Kort side mod personen i sengen.



Løsne lagenet fra sengens madras.



Vip patienten lidt ved at trække i lagnet.

Placér nu Spilerdugen 1/2 ind under patienten.



Placér til sidst sliden under Spilerdugen og 1/3 ind under patienten.



Kør seng til scanningsleje.

**OBS.** Sengen skal være højere end lejet.



Vip først patientens krop så vægten øges på slide og Spilerdug.

Kolleger på modsatte side holder i kanten af lagnet og glider patienten over på lejet.





Fjern sliden og kør sengen væk fra lejet.

Spilerdug og lagen forbliver under patienten under scanningen.



Korriger evt. personens placering på lejet ved at trække i lagenet.

Fra liggende på scanningsleje til seng.



Vip patienten lidt ved at trække i lagnet.

Placér herefter sliden under Spilerdugen og 1/3 ind under patienten.

Kør seng til scanningsleje.

**OBS.** Sengen skal være lavere end lejet.





Vip først patientens krop så vægten øges på slide og Spilerdug.



Kolleger på modsatte side holder i kanten af lagnet og glider patienten over på lejet.



Fjern sliden og kørsengen væk fra lejet.

Korriger patientens placering inden spilerdugen fjernes.

Fjern Spilerdugen ved at trække diagonalt i nederste lag af Spilerdugen.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave

"Fra seng til scanningsleje og retur. (rev 001).

