

Ned at ligge og op at sidde på scanningsleje.

Vejledningen viser eksempler på, hvordan man på Klinisk Fysiologisk Nuklear-medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge, anvender Spilerdug.


Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflytningsmetoder.

Fra siddende til liggende på scanningsleje.



Placér 2 foldet stykker spilerdug på scanningslejet.


Et stykke til benene og et stykke til kroppen.

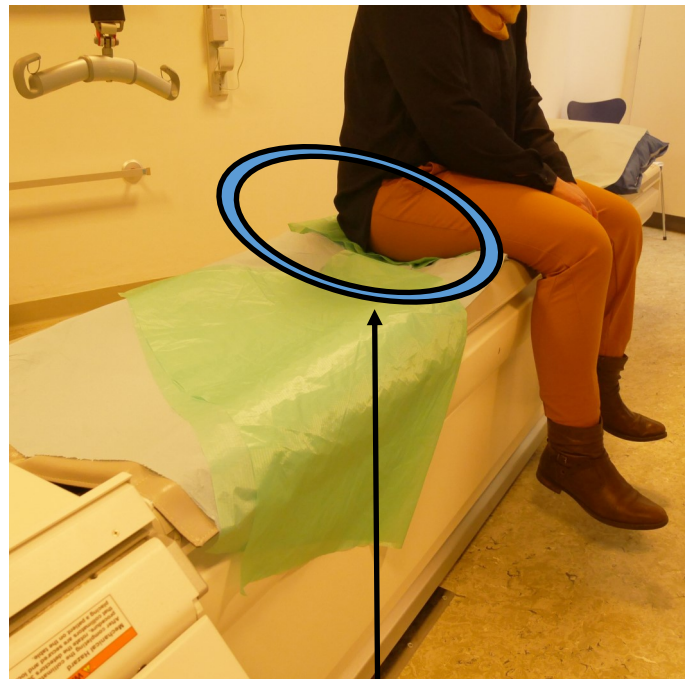

Lad patienten sætte sig på spilerdugen til kroppen, så tæt på kanten, som vist på billedet.



Bed patienten om at tage fat i løfteåg.
Placer lagen omkring patientens ankler.

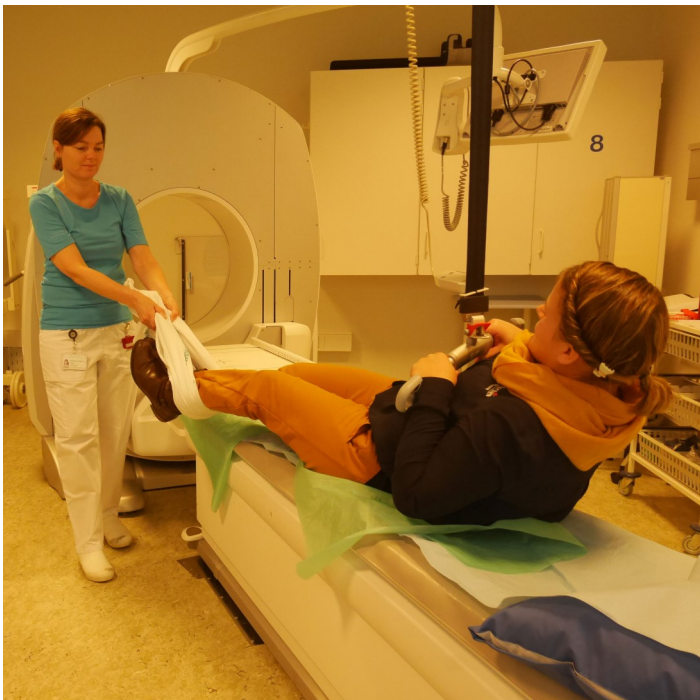

Grib om lagnet med begge hænder.
Hold armene strakte og skuldrene sænkede under hele forflytningen.
Gå baglæns indtil benene er gledet ind i sengen.
Patienten skal følge med i bevægelsen.



Lad patienten slippe løfteåg, når personen ligger på scanningslejet.



Korriger patientens placering på scanningsleje vha. spilerdug.

Lad patienten bøje benene og skubbe sig længere op på scanningslejet.

Spilerdugen forbliver her under scanningen.

Fra liggende til siddende på scanningsleje.



Spilerdugen ligger under patienten fra forflytningen fra siddende til liggende.

Hvis ikke lagnet er placeret om anklerne, så placer dette.

Bed patienten tage fat i løfteåg.



Elevér løfteåg og bed patienten om at følge med i bevægelsen til siddende.



Lad patienten slippe løfteåg, når patienten er kommet til siddende stilling.

Grib om lagnet med begge hænder.

Hold skuldrene nede og armene i ro og gå baglæns til benene er ude over lejekanten.



Slip lagenet med det samme patienten har begge fødder udover kanten.



Patienten sidder på lejekant og kan nu rejse sig fra scanningslejet.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave

"Ned at ligge og op at sidde på scanningsleje (rev 001).

