

Spiler+ - op at sidde på sengekant



I denne vejledning kan du se et eksempel på, hvordan du kan benytte Spiler+ long til at flytte en person fra liggende i sengen til siddende på sengekant. Video af dette kan du se på vores hjemmeside, ligesom du kan se flere vejledninger om, hvordan du kan anvende Spiler+.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk




Personen ligger på en Spiler+ Long med 2 stykker 150x100 spilerdug under.

Forflytningen udføres af 2 hjælpere.



Glid Spilerdugen op, til lige før personens bagdelen.

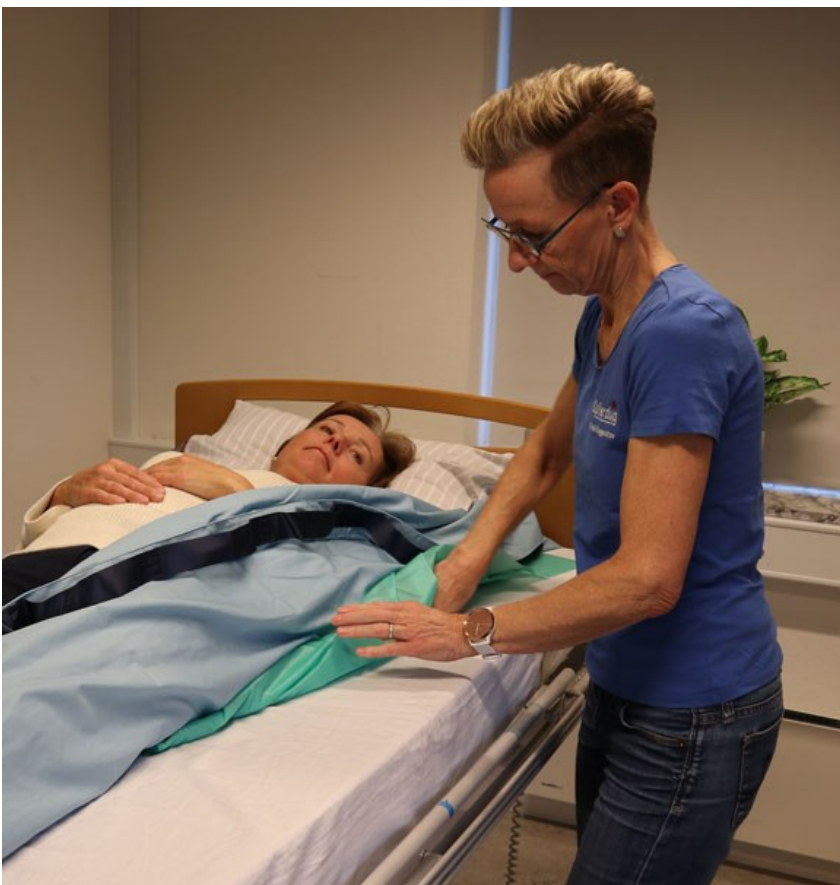


Fold Spilerdugen ind langs kroppen i den side personen skal op til.



Placér et foldet stykke Spiler-dug under personens nærmeste læg og hæl.

Hjælper 2 skaber plads.

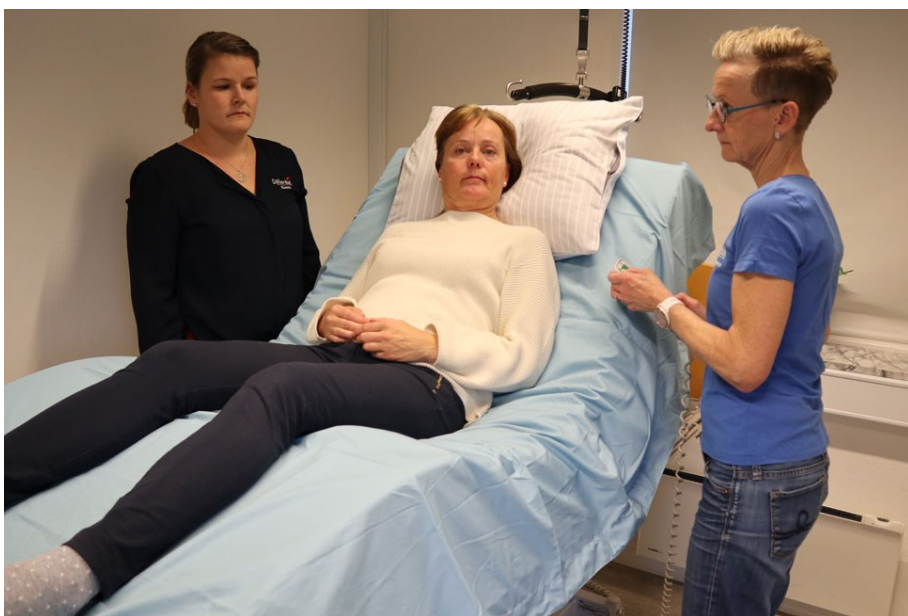


Hæv knæ-knækket og rygdelen på sengen.



Montér loftliften i de 2 øverste stropper i hver side af Spiler+.

Sænk sengen og elevér liften skiftevis i etaper, indtil ryggen slipper sengen.

Sænk rygdelen.

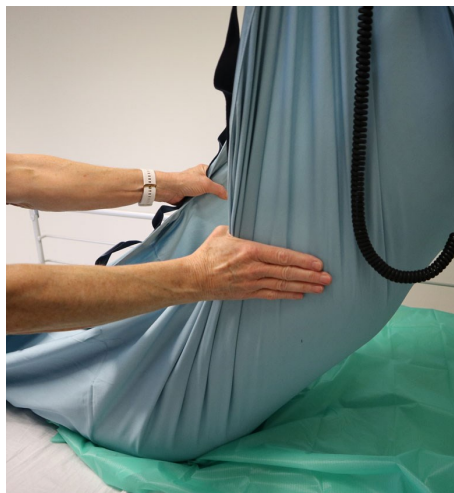

Hjælper 1 griber fat i Spiler+ ud for personens skuldre.



Hjælper 2 griber fat i Spiler+ ud for personens ankler og starter bevægelsen.

Drej personen—rotér omkring bækket—ved at hjælper 2 går baglæns og hjælper 1 guider overkroppen.



Hjælper 2 fjerner Spilerdugen under benene og sænker sengen til personen har kontakt med underlaget.

Hjælper 1 sikrer at personen har den sidende balance inden liftten sænkes.



Spilerdug er CE-mærket under MDR EU No.2017/45 forordning (EU) 2017/745 og lever op til standard DS/EN 12182 2012-12-21 4. udgave.

"Spiler+ - Op at sidde på sengekant" (Rev 001)

