

Spiler+ - vending på røntgenleje

Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem Brehms Spilerdug og forflytningsvejlederne på billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn sygehus.



Vejledningen tager udgangspunkt i de betingelser, der er på afsnittet og for den specifikke forflytning:

- * Den tilgængelige lift er en gulvmodel.
- * Lejet er smalt, ca. 70 cm.
- * Højden på lejet er i situationen låst fast i ca. 95 cm.
- * Patienten skal vendes om på højre side.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk



Placér et stykke foldet Spilerdug (150x100 cm) med åbningen mod højre side af sengen og folden ca. 15 cm fra kanten.


Fold Spilerdugen 2 gange ned mod lejet i højre side, så den nu ligger symmetrisk.



Placér Spiler+ ovenpå Spilerdugen, så stropperne kun lige ligger ud over kanten af lejet i venstre side.



På højre side hænger et længere stykke ud over kanten af lejet.

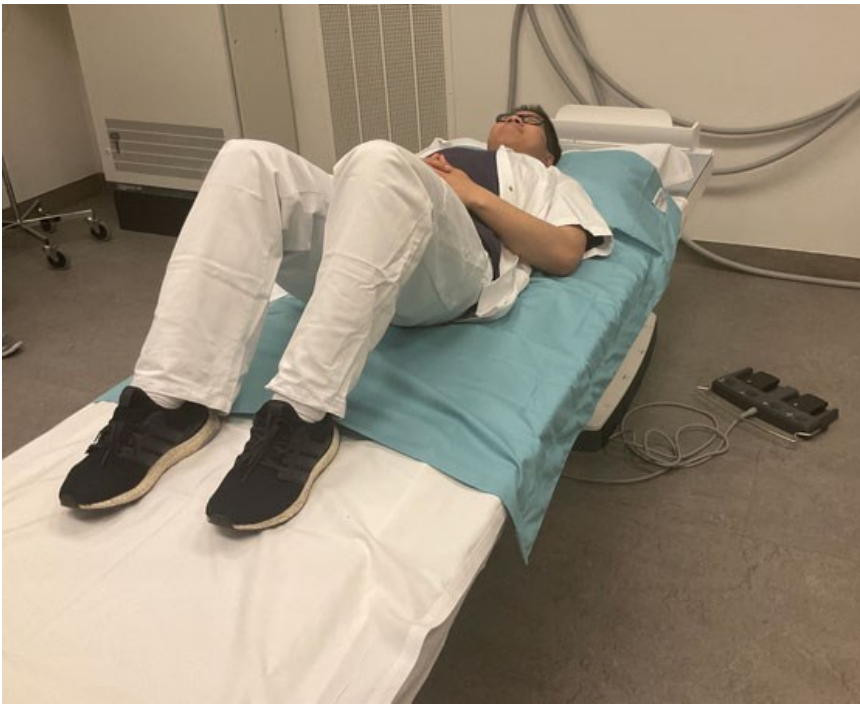

Patienten placeres eller placerer sig på Spiler+



Spiler+ hægtes på liftåget ud for skulder og hoft i venstre side.



Spilerdugen foldes ud under patienten i højre side.



Hjælper 2 hæver liften.

Hjælper 1 er klar på højre side til at glide patienten ind.



Mens liften vender patienten, glider hjælper 1 patienten ind, så han under hele vendingen befinder sig midt på lejet.



Når patienten er helt omme på siden og ligger stabilt, sænkes liften og fjernes.



Spilerdug er CE-mærket under MDR EU No.2017/45 forordning (EU) 2017/745 og lever op til standard DS/EN 12182 2012-12-21 4. udgave.



"Spiler+ - vending på røntgenleje" (Rev 001)