

## Placere og fjerne Spilerdug under Spiler+



Fæst **Spiler+ Short** eller **Long** på liftens løfteåg.

Fold Spilerdugen i fede folder.



Kør liften lidt op så du skaber plads. Personen skal blot vippes lidt.

Placer Spilerdug halvt ind under kroppen, som du plejer.

Her er anvendt et foldet stykke Spilerdug under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fæst Spiler+ på liftens løfteåg på modsatte side og køр liften lidt op så personen vippes.

Fold Spilerdugen ud.

Nu kan du anvende liften til at trække personen til siden, vendinger eller højere op i seng.



Hvis du anvender **Spiler+ Long**

Her er anvendt et foldet stykke Spilerdug under kroppen og et under lægge/fødder.

Yderligere information om at placere Spilerdug, se "At Placere spilerdug" (vejledning eller videoer) på [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk).



## Fjern spilerdugen



Når forflytningerne er udført, fjernes Spilerdugen.

Fæst Spiler+ på liftens løfteåg og kørliften lidt op så personen vippes.

Glid Spilerdugen halvt ind under kroppen.



Sænk løfteåget og afmonter Spiler+.



Fjern Spilerdugen fra modsatte side.

Yderligere information om at fjerne Spilerdug, se "At fjerne Spilerdug" (vejledning eller videoer) på [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk).

## Fakta om Spiler+



### Spiler+ Short

Varenummer/HMI: 101928

145 cm bred x 140 cm lang.

Vejledende størrelse på spilerdug:

2 stykker 100 cm x 150 cm.



### Spiler+ Long

Varenummer/HMI: 101927

145 cm bred x 240 cm lang.

(kan eventuelt erstatte lagenet)

Vejledende størrelse på spilerdug:

2 stykker 100 cm x 200 cm.

- Kan vaskes på 80 grader. Brug ikke skyllemiddel.  
Tørretumbles ved lav temperatur.
- Maxbelastning 200 kg.
- 65 % polyester og 35 % bomuld (lagen), 100% polyester (håndtag)



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO 21856:2022.

Revideret juli 2023

