

## Vending i seng med Spiler+



Spiler+ er et enkelt vendesystem, som du anvender sammen med Spilerdug, når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet.

Ved brug af Spiler+ bliver forflytningen mere skånsom for personen der forflyttes og samtidig forebygger du fysisk belastning og nedslidning af hjælperen.

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan benytte Spiler+ til at vende en person i sengen.

## Vending med Spiler+ Long, passiv person



Personen ligger på Spiler+ Long med Spilerdug under og i hele kroppens længde.



Placér et foldet stykke Spilerdug ved benene, så det øverste ben let følger med rundt under vendingen.



Hægt Spiler+ på liftens løfteåg, så du har 2 stropper ud for hofte og knæ i den samme krog, og 1 strop ud for skulder i den anden krog.



Kør liften op og lad den klare vendingen, mens du i etaper glider personen ind på midten af sengen.



Glid det øverste ben frem, evt. på en i forvejen placeret pude (ikke vist), så personen ligger stabilt.

### Vending med Spiler+ Short, delvis passiv person



Personen ligger på Spiler+ Short med Spilerdug under fra hovedgavl til og med bagdel.

Personen har bøjede ben og antiglid under fødderne.



Hægt Spiler+ på liftens løfteåg ud for skulder og hofte.

Hovedpuden flyttes ud til sengekanten, så personen også har hovedstøtte efter vendingen.



Kør liften op og lad den klare vendingen, mens du i etaper glider personen ind på midten af sengen.

Brug flad hånd med håndfladen opad ud for tyngdepunkterne.



Slut af med at justere stillingen, ved at placere dine hænder på knæene og skub i lårenes længderetning.

Afmontér liften og fjern Spilerdugen.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO 21856:2022.

