

## Spiler+ - op at sidde på sengekant



Spiler+ er et enkelt vendesystem, som du anvender sammen med Spilerdug, når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet.

Ved brug af Spiler+ bliver forflytningen mere skånsom for personen der forflyttes og samtidig forebygger du fysisk belastning og nedslidning af hjælperen.

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan benytte Spiler+ Long til at flytte en person fra liggende i seng til siddende på sengekant.

Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - [info@spilerdug.dk](mailto:info@spilerdug.dk) - [www.spilerdug.dk](http://www.spilerdug.dk)



Personen ligger på en Spiler+ Long med 2 stykker 150x100 Spilerdug under.

Forflytningen udføres af 2 hjælpere.



Glid Spilerdugen op, til lige før personens bagdelen.




Fold Spilerdugen ind langs kroppen i den side personen skal op til.



Placér et foldet stykke Spilerdug under personens nærmeste læg og hæl.

Hjælper 2 skaber plads.

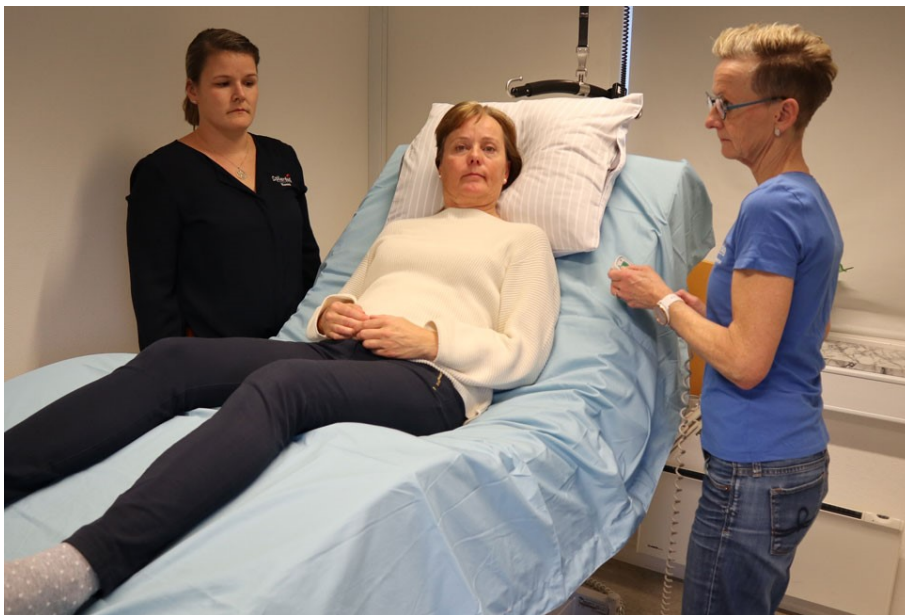


Hæv knæ-knækket og rygdelen på sengen.



Montér loftliften i de 2 øverste stropper i hver side af Spiler+.

Sænk sengen og elevér liftens skiftevis i etaper, indtil ryggen slipper sengen.

Sænk rygdelen.

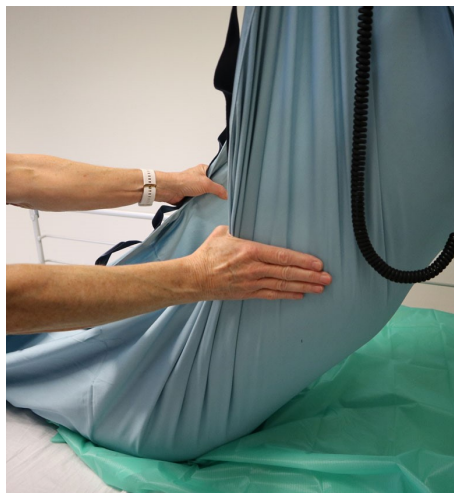

Hjælper 1 griber fat i Spiler+ ud for personens skuldre.



Hjælper 2 griber fat i Spiler+ ud for personens ankler og starter bevægelsen.

Drej personen—rotér omkring bækket—ved at hjælper 2 går baglæns og hjælper 1 guider overkroppen.



Hjælper 2 fjerner Spilerdugen under benene og sænker sengen til personen har kontakt med underlaget.

Hjælper 1 sikrer at personen har den sidende balance inden liftten sænkes.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO 21856:2022

Revideret juli 2023

