

Sejl på fra endegavl med Spiler+



Spiler+ er et enkelt vendesystem, som du anvender sammen med Spilerdug, når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet.

Ved brug af Spiler+ bliver forflytningen mere skånsom for personen der forflyttes og samtidig forebygger du fysisk belastning og nedslidning af hjælperen.

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan give et sejl på fra endegavlen med Spiler+ ved en passiv person.



Placer 2 enkelt stykker Spilerdug (100x150 cm) under Spiler+.

Se evt. vejledningen "Placere og fjerne Spilerdug under Spiler+"

Placer hovedpuden så den også ligger under skuldrene, da det øger komforten for personen.



Hægt 2-3 stropper på liftens åg i begge sider, for at give god hovedstøtte. Start ud for skulderen, og fortsæt op mod hovedgavlen.



Hæv liften, så personens overkrop kommer fri af underlaget.

Lav en individuel vurdering af, hvor højt personen overkrop bør hæves.




Hold sejlet med indersiden opad og glid sejlets ene benstrop, ind imellem de to lag Spilerdug, ca. ud for skuldrene.



Glid sejlet så langt ind at det ligger symmetrisk i forhold til personen.

Glid sejlet så langt ned som muligt — dog ikke længere end til halebenet.

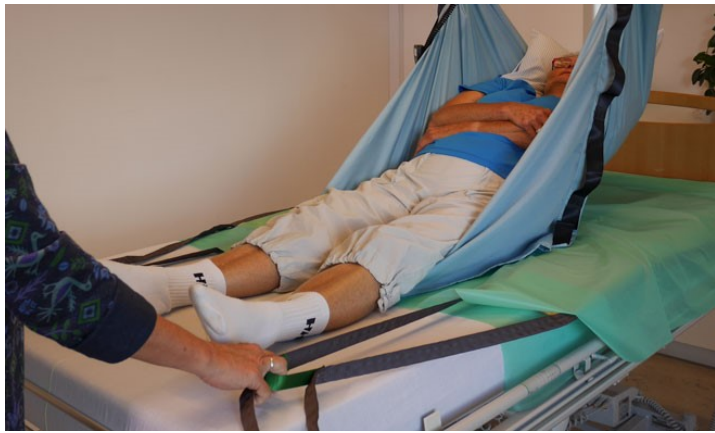

Justér om nødvendigt sejlets placering fra fodenden af sengen, og tjek om det ligger korrekt og symmetrisk i forhold til personen.

Fjernelse af Spiler+



Sænk liften og fjern stropperne fra den ene side af åget.

Fold Spiler+ nedad omkring det øverste lag Spilerdug og glid Spiler+ ind ovenpå sejlet.





Fjern stropper fra åget, så der kun er én strop tilbage ud for skulderen.

Placér en strop i åget ud for hoften.




Glid Spiler+ så langt ind, langs hele kroppen, at du kun kan skimte den.

Vær specielt opmærksom på, at den kommer godt ind ved skulder og hofte.



Hæv liften, så personen vippes.

Find hjørnet af Spiler+ mellem de to lag Spilerdug.

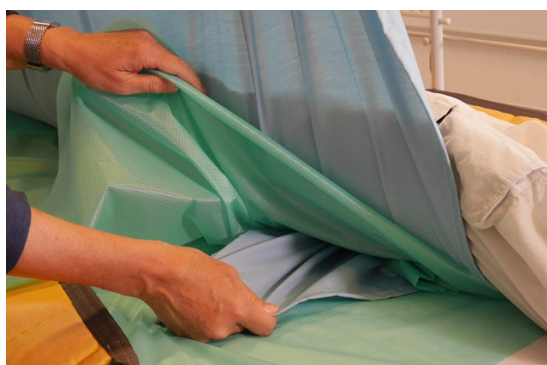

Træk nu i roligt tempo og diagonalt Spiler+ ud og op mod hovedenden, indtil den er fjernet helt.

Personen vil gradvist følge med bevægelsen tilbage til rygliggende.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO

Revideret august 2023

