

Slipp

når du hjælper kompressionsstrømpe på og af
med Doff N' Donner



Anvend Slipp'en, når du vil undgå at muffen fra Doff N' Donner hænger fast i lagen eller Spilerdug, når personen ikke kan løfte benet.

Du kan finde video om denne metode på vores hjemmeside.

Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk

Når strømpen skal på



Her er hvad du skal bruge.

Det vil yderligere lette arbejdet, hvis du bruger handsker med friktion.

Fold et stykke Spilerdug (150x50)



Fæst det under hælen (kun lige så det hænger fast), med den åbne ende forrest.




Træk det nederste lag Spilerdug op til knæhasen.



Placér Slipp'en under hælen.
Hælen skal hvile lige på markeringen.



Træk om nødvendigt det øverste lag
Spilerdu ned, så kanten flugter med
Slipp-kanten.

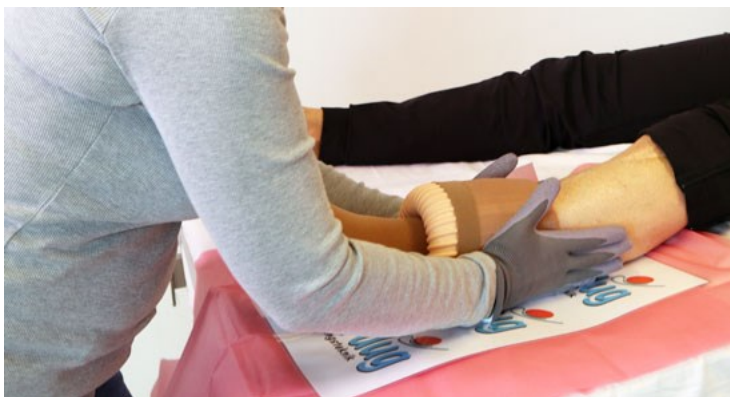

Når strømpen rulles på med muffen, vil
Slipp'en følge med op.
OBS: Den ru side af handsken/
håndkanten skal holde kontakt til Slipp!



Når strømpen sidder korrekt - placér
hænderne på Slipp'en og glid den mod
dig selv. Muffen følger med.

Når strømpen skal af



Når strømpen skal af, anvendes Slipp'en på præcis samme måde.



Slipp'en følger med, når muffen rulles på.



Når strømpen rulles af med muffen, følger Slipp'en med. OBS: Den ru side af handsken/håndkanten skal holde kontakt til Slipp!



Du får Slipp'en med, med kvik-guide på bagsiden, når du køber Doff N' Donner hos Spilerdug ApS.

Du kan også købe den separat på vores hjemmeside.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO 21856:2022.

Revideret Juli 2023

