

Generel vejledning i brug af Spilerdug

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO 21856:2022.



Denne vejledning gælder for alle typer af Spilerdug fra Spilerdug ApS.

Spilerdug er en glat metervare, den forhandles i 3 forskellige niveauer af fleksibilitet: elastisk, mellem og uelastisk.

Spilerdug er et hjælpemiddel til at nedsætte friktion ved personforflytning samt på- og afklædningsituationer. Ved brug forebygger du fysisk belastning og nedslidning af hjælperen og friktionsskader hos personen du forflytter.

Spilerdug er testet og godkendt i henhold til det medicinske direktiv og er Øko-tex 100 certificeret efter Teknologisk Instituts forordninger.

Spilerdug ApS

Spilerdugs typer

Spilerdug **elastisk**, **mellem** og **uelastisk**

De tre typer Spilerdug har forskellig fleksibilitet hvilket er et udtryk for elasticiteten i det diagonale træk.

Spilerdug elastisk

Det bedste valg i på- og afklædningssituationer, ved bar hud, da den er meget elastisk og føles blød. Den er velegnet til forflytning ved terminalpleje og forflytninger af personer, hvor lyden vil genere - fx demente.

Spilerdug mellem

En allround Spilerdug der dækker et bredt funktionsområde. Den mest velegnede til generelle forflytninger - i seng eller kørestol.

Spilerdug uelastisk

En Spilerdug der er velegnet til forflytning af tunge personer på temperaturfølsomt underlag, vekseltrykmadrass o.lign. Er også velegnet til arbejde hvor Spilerdugen bliver våd fx ved forflytning på bruseleje.

Størrelser

Spilerdug fås i forskellige størrelser ruller og enkeltstykker. Klipper man et stykke Spilerdug fra en rulle benyttes en skarp saks eller cutter. Størrelsen på Spilerdugen skal dække personens trykpunkter og give glid i hele bevægeretningen.

Sikkerhedsanbefalinger

Spilerdug er et hjælpemiddel i et meget glat materiale, som altid skal benyttes med omtanke. Vi anbefaler at Spilerdug fjernes efter brug. Vurderer man at Spilerdug skal forblive under en person anbefaler vi i hvert konkrete tilfælde, at foretage en vurdering i relation til personens sikkerhed.

I forbindelse med forflytning ind/ud af sengen eller længere tilbage i stol anbefaler vi at placere Spilerdugen med minimum 10 cm afstand til madras- eller sædekant.

Hjelperne skal være instrueret i brugen af Spilerdug for at sikre, at den anvendes hensigtsmæssigt og at der ikke opstår uforudsete hændelser.

Spilerdug må aldrig bruges i nærheden af åben ild eller andre kilder med tilgængelig flamme eller glødeelementer m.v.

Spilerdugen må ikke efterlades på gulv eller siddeflade efter endt brug. Det anbefales efter endt brug at placere Spilerdugen et fast sted (fx under madrassen) eller i en dertil egnet opbevaringspose på sengen.

Generel vejledning i brug af Spilerdug ved forflytning

Anvend dobbelt lag Spilerdug. Glideeffekten er meget større ved dobbelt lag end ved brug af enkelt lag.

Ved dobbelt lag Spilerdug følger det øverste lag personen og det nederste lag forbliver på underlaget. Dobbelt lag Spilerdug er lettere at fjerne uden at der trækkes i personens tøj eller hud. Der forekommer ikke friktion og risiko for skade på personens hud og underliggende væv forebygges.

Spilerdugen kan anvendes direkte mellem personen og underlaget og fremmer derved personens brug af egne ressourcer i forflytningerne.

Spilerdugen kan desuden anvendes under Spiler+, så loftliften kan assistere forflytningerne eller under et lagen, der fungerer som et trækstykke.

Det anbefales at arbejde med rolige træk og skub, for at justere brugen af kræfter i forhold til Spilerdugens nedsættelse af friktion.

Uanset type af forflytning gælder følgende principper:

- Giv luft - skab plads under kroppen ved rotation og vip
- Placér Spilerdugen
 - ⇒ brug flade hænder
 - ⇒ nord og syd omkring tyngdepunkterne
 - ⇒ i hele den retning forflytningen skal ske
- Giv tyngde ned på Spilerdugen og forflyt
- Fjern Spilerdugen
 - ⇒ Træk i nederste lag
 - ⇒ Træk diagonalt
 - ⇒ Skift retning, hvis det føles tungt

Statisk elektricitet

Ved lav luftfugtighed kan der forekomme en risiko for at Spilerdugen oplader statisk elektricitet når der anvendes visse typer syntetiske skosåler eller materialer. Vær derfor opmærksom på kilder til statisk elektricitet.

Holdbarhed og rengøring

Spilerdug er som udgangspunkt ikke et recirkulations-hjælpemiddel. Det anbefales at betragte Spilerdug som et materiale, der følger en enkelt person. Hvis en arbejdsplads recirkulerer Spilerdugen, anbefales det, at en klinisk sygeplejerske skriver en procedure herfor, inklusiv rengøringsproces.

Overfladen på Spilerdug slides ved såvel brug som ved rengøring. Vær derfor altid opmærksom på, at materialet har tilfredsstillende glideevne under forflytningsarbejdet.

Da der ikke er syninger i Spilerdug, kan rengøring og desinfektion hurtigt gennemføres ved at tørre Spilerdugen over med vådserviet fx med sæbe og/eller med desinficerende midler (fx ethanol, sprit, klor).

Vask af Spilerdugen anbefales ikke. Efter blot én vask reduceres glideevnen på Spilerdugen og derved forringes Spilerdugens evne til at mindske friktion under forflytning af en person.

Bortskaffelse

Når Spilerdugen er slidt eller personen ikke skal benytte den mere kasseres den. Spilerdug affaldssorteres som blød plast.

Alvorlige hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der måtte indtræffe i forbindelse med produktet, bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og eller hjælperen er etableret.

Til sporing af det konkrete produkt oplyses produktets LOT nr. og produktionsdato ved aflæsning af label eller scanning af QR-kode.

Alle henvendelser om Spilerdug rettes til:

Spilerdug ApS

Metalvej 13

4180 Sorø

Danmark

Tlf: +45 5764 8351

E-mail: info@spilerdug.dk

Web: www.spilerdug.dk



Copyright: Denne vejledning må kun kopieres i sin helhed med skriftlig accept af Spilerdug ApS

 Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) MDR 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr og efterlever standarden DS/EN ISO 21856:2022.

