

Slipp - så let som fod i hose

Brug Slipp og undgå, at muffen hænger fast i lagen eller Spilerdug, når personen ikke kan løfte benet.

Du får Slipp med, når du køber Doff N' Donner hos Spilerdug ApS



Her er hvad du skal bruge



Spilerdug under hæl



Underste lag til knæhase



Hæl på markering



Øverste lag til Slipp-kant



Muffe med strømpe glides på



Slipp følger med når den ru handske



Glid Slipp retur - muffen følger med

Muffen tåler aftørring med sprit eller med vand og sæbe. Muffen kan opbevares enten på keglen eller liggende. Tåler ikke varme eller direkte sollys.

Se vejledning og videoer på www.spilerdug.dk
eller scan QR-koden for at se video



Strømpe på



Strømpe af

Hæl

Spilerdug
Forflytningsteknik

Spilerdug
Forflytningsteknik

Spilerdug
Forflytningsteknik